

DE
GEBRAUCHSANWEISUNG
THEALIPID®
Phospholipid-Mikroemulsion zur
Anwendung am Auge
Multi-Dosis-Flasche mit 10 ml

1. BESCHREIBUNG

THEALIPID ist eine Mikroemulsion, die durch eine wässrige und eine lipide Phase gebildet wird. Die Hauptbestandteile der lipiden Phase sind die natürlichen Bestandteile der Tränenflüssigkeit (Phospholipide und mittelkettige Triglyceride).

Die in der Mikroemulsion enthaltenen submikroskopischen Lipidpartikel schützen die Augenoberfläche, indem sie eine dünne wasserabweisende Barriere bilden, die der im Tränenfilm enthaltenen natürlichen Lipidschicht sehr ähnlich ist.

2. ANWENDUNGSGEBIETE

THEALIPID, die Phospholipid-Mikroemulsion zur Anwendung am Auge, lindert Symptome des Trockenen Auges und wird Personen mit erhöhter Tendenz zur Verdunstung oder Instabilität des Tränenfilms, bei refraktiven Eingriffen oder anderen Augenoperationen, bei Verletzungen am Auge oder erhöhter Beanspruchung durch Bildschirmtätigkeiten empfohlen.

3. GEGENANZEIGEN

Im Falle einer spezifischen Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile nicht verwenden.

4. ZUSAMMENSETZUNG

Phospholipide aus Sojabohnen, mittelkettige Triglyceride (MKT), Sojabohnenöl, Glycerin, Dinatriumedetat, α -Tocopherol und gereinigtes Wasser.

5. DOSIERUNG


1 oder 2 Tropfen nach Bedarf oder wie von Ihrem Arzt empfohlen.

6. ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE


- Waschen Sie sich vor der Anwendung gründlich die Hände.




Originalitätssiegel entfernen.

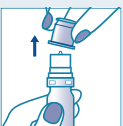

Schutzkappe abnehmen.
Achten Sie darauf, die
Flaschenspitze nicht mit den
Fingern zu berühren.

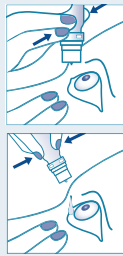

Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten und ziehen Sie das Unterlid mit einem Finger Ihrer freien Hand leicht nach unten. Halten Sie die Flasche mit der Tropferspitze senkrecht nach unten über Ihr Auge. Drücken Sie die Flasche nun leicht zusammen, um einen oder zwei Tropfen bzw. die von Ihrem Arzt empfohlene Dosis in jedes Auge einzutropfen. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt zwischen der Flaschenspitze und den Augen oder Fingern, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung zu verhindern.

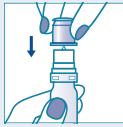

Setzen Sie nach Gebrauch die Schutzkappe wieder auf.

7. NEBENWIRKUNGEN


- Direkt nach dem Eintropfen kann es kurzzeitig zu verschwommenem Sehen kommen. Warten Sie, bis Ihre Sicht wieder klar ist, bevor Sie Ihre normalen Aktivitäten wiederaufnehmen, und lenken Sie keine Fahrzeuge oder bedienen Sie keine gefährlichen Maschinen, bis Ihr Sehvermögen wieder normal ist. Sollten die Symptome andauern oder sich verschlimmern, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Es kann nach dem Eintropfen des Produkts zu Augenreizungen kommen: bei Schmerzen, Sehstörungen oder Rötung unterbrechen Sie die Anwendung von Thealipid und wenden sich an Ihren Arzt.
- Bei Anwendung des Produkts können Entzündungen, Infektionen und Allergien auftreten.
- Bei falscher Handhabung der Flasche können Hornhautabschürfungen oder Geschwüre beobachtet werden.
- Wenn Sie nach der Anwendung dieses Produkts Nebenwirkungen oder ungewöhnliche Empfindungen bemerken, wenden Sie sich bitte an medizinisches Fachpersonal und teilen Sie die Information dem lokalen Vertrieb, dem Hersteller oder der zuständigen Gesundheitsbehörde (siehe Kontaktdaten am Ende der Gebrauchsanweisung) mit.

8. WARNHINWEISE

- Im Falle einer spezifischen Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile nicht verwenden.
- Wie bei allen Augenprodukten besteht die Gefahr verschwommenen Sehens für einige Minuten nach dem Eintropfen. Lenken Sie keine Fahrzeuge oder bedienen Sie keine gefährlichen Maschinen, bis Ihre Sicht wieder normal ist. Sollten die Symptome andauern oder sich verschlimmern, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Im Falle verschwommenen Sehens führen Sie erst dann wieder Aktivitäten aus, wenn die kurzzeitig verschwommene Sicht, die unmittelbar nach der Produkthanwendung auftreten kann, wieder klar ist.
- Es kann nach dem Eintropfen des Produkts zu Augenreizungen kommen: bei Schmerzen, sichtbarer Rötung oder Sehstörungen unterbrechen Sie die Anwendung und wenden sich an Ihren Arzt.
- Die Lösung nicht schlucken.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Das Produkt nicht gleichzeitig mit anderen Produkten ins Auge tropfen, da sonst deren Wirkung beeinträchtigt/verändert werden kann. Warten Sie mindestens 15 Minuten zwischen dem Eintropfen zweier unterschiedlicher Augentropfen.
- Teilen Sie die Flasche nicht mit weiteren Personen, um Verunreinigungen (Kreuzkontaminationen) zu vermeiden.
- Die Lösung nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Zur Vermeidung des Risikos einer verschwommenen Sicht wird empfohlen, das Produkt nicht während des Tragens von Kontaktlinsen anzuwenden.

9. AUFBEWAHRUNG

- Bei 2 °C bis 25 °C lagern.
- Nicht einfrieren.
- Produkt nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden.
- Nach Anbruch der Flasche ist das Produkt innerhalb von 90 Tagen verwendbar. Reste des Produkts sind zu entsorgen.

 Tubilux Pharma SpA
Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (RM)
Italien

 0123

THEALIPID® is a registered trademark of Laboratoires Théa. ©2021, Laboratoires Théa. All rights reserved.

**Stand der Information:
November 2022**

DE



Thea Pharma GmbH
Schillerstr. 3
10625 Berlin
Deutschland
www.theapharma.de
Tel. 030 / 315 18 98-0

Gesundheitsbehörde:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
53175 Bonn
Deutschland
www.bfarm.de













AT



Thea Pharma GmbH
Mariahilfer Straße 103/3/52
1060 Wien
Österreich
www.thea-pharma.at

Gesundheitsbehörde:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
www.basg.gv.at

	Hersteller		Gebrauchsanweisung beachten
	Fertigungslosnummer, Charge		Einzelner Patient – Mehrfach anwendbar
	Medizinprodukt		Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Verwendbar bis		Herstellungsdatum
	Temperaturbegrenzung +25°C +2°C		Sterilisiert mit aseptischen Verfahren
	Für Kinder unzugänglich aufbewahren		Vertrieb