

Thealoz® Duo Gel

Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt.
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der
Anwendung.

Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Sie möchten
sie vielleicht noch einmal lesen.

ANWENDUNGSGEBIETE

THEALOZ DUO GEL wird zum Schutz, zur Befeuchtung und zur
Benetzung des Auges bei der Behandlung von moderaten bis
schweren Symptomen trockener Augen angewendet.

Nur zur Anwendung am Auge.

GEEIGNET FÜR

- Erwachsene,
- Kinder: Die Eltern oder eine betreuende Person sollten das
Produkt verabreichen,
- Schwangere oder stillende Frauen (nach derzeitigem
Kenntnisstand).

GEGENANZEIGEN

THEALOZ DUO GEL darf nicht angewendet werden, wenn Sie
allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind (siehe
Produktbeschreibung).

PRODUKTBESCHREIBUNG

THEALOZ DUO GEL ist ein Augengel bestehend aus Trehalose
(3 %), Natriumhyaluronat (0,15 %), Carbomer (Carbopol 974P,
0,25 %), Sorbitol, Natriumhydroxid und Wasser für
Injektionszwecke.

THEALOZ DUO GEL ist ein steriles, phosphatfreies, hypotones
und pH-neutrales flüssiges Gel.

THEALOZ DUO GEL ist schonend für die Augen, da es
frei von Konservierungsmitteln ist. Durch den Verzicht auf
Konservierungsmittel wird das Augengewebe geschützt und
das Produkt verursacht keine Reaktion bei Anwenden, die
empfindlich auf Konservierungsmittel reagieren.

NUTZEN, LEISTUNG UND WIRKUNGSWEISE

THEALOZ DUO GEL wird bei Missempfinden, Stechen,
Fremdkörpergefühl oder Reizung im Auge empfohlen. Diese
Symptome können verursacht werden durch:

- Umwelteinflüsse wie Wind, Rauch, Luftverschmutzung, Staub,
Sonne oder Kälte, trockene Hitze, Klimaanlage, Flugreisen oder
lange Bildschirmarbeit;
- Augenoperationen wie refraktive Eingriffe (Laserbehandlungen)
und Katarakt (Grauer Star)-Operationen..

THEALOZ DUO GEL bietet Komfort für die Augen, eine
langanhaltende Linderung der Symptome trockener Augen und
Linderung der Beschwerden an der Augenoberfläche, die nach
einer Augenoperation auftreten.

Die Hauptbestandteile von THEALOZ DUO GEL sind Trehalose,
Natriumhyaluronat und Carbomer (Carbopol 974P).

Trehalose ist eine natürliche Substanz, die in vielen Pflanzen
und Tieren vorkommt, die unter extrem trockenen Bedingungen
überleben können. Sie bietet schützende und befeuchtende
Eigenschaften.

Natriumhyaluronat, das von Natur aus im menschlichen
Auge vorkommt, bindet Wasser, um die Augenoberfläche zu
befeuchten und zu benetzen. Es bewirkt, dass das Gel auf der
Augenoberfläche verbleibt, sorgt für langanhaltende Linderung
und verkürzt die Heilungszeit der Augenoberfläche.

Durch Carbomer verbleibt THEALOZ DUO GEL länger auf der
Augenoberfläche, was eine langanhaltende Linderung der
Anzeichen und Symptome trockener Augen bietet.

Die spezielle Kombination von Trehalose, Natriumhyaluronat
und Carbomer in THEALOZ DUO GEL bietet besonders
langanhaltenden Schutz, Befeuchtung und Benetzung der
Augenoberfläche.

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Dosierung: 1 Tropfen in jedes Auge, 1- bis 4-mal täglich.
Da es sich jedoch um ein Gel handelt, eignet sich THEALOZ DUO
GEL besonders für die Anwendung am Abend, kurz vor dem
Schlafengehen.

Für die Verwendung von THEALOZ DUO GEL ist keine besondere
Schulung erforderlich.

Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, nehmen Sie diese vor der
Verwendung von THEALOZ DUO GEL immer heraus.

Warten Sie nach der Anwendung mindestens 30 Minuten, bevor
Sie Ihre Kontaktlinsen wieder einsetzen.

Waschen Sie sich vor der Anwendung gründlich die Hände.
Öffnen Sie den Folienbeutel und trennen Sie ein
Einzeldosisbehältnis vom Streifen ab.

Geben Sie den Rest des Streifens zurück in den Beutel.

Benutzen Sie keine Hilfsmittel, um das Einzeldosisbehältnis zu
öffnen.

Drehen Sie das Einzeldosisbehältnis auf den Kopf, schütteln Sie
es vorsichtig und klopfen Sie leicht dagegen, bis sich das Gel nach
unten bewegt.


Öffnen Sie das Einzeldosisbehältnis, indem Sie die obere Lasche
abdrehen.

Um eine Verunreinigung zu vermeiden, darf die
Einzeldosisbehältnis-Spitze nicht berührt werden.

Drücken Sie das Einzeldosisbehältnis, bis Sie einen Tropfen des
Gels sehen können.

Ziehen Sie das Unterlid vorsichtig nach unten, schauen Sie
nach oben und geben Sie einen Tropfen in den Bindehautsack.
Schließen Sie das Auge sanft nach der Anwendung.

Verwerfen Sie das Einzeldosisbehältnis nach der Anwendung,
auch wenn noch etwas Gel vorhanden ist. Bewahren Sie es nicht
auf.

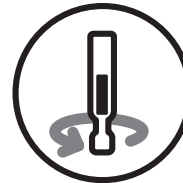

VORSICHTSMASSNAHMEN

Prüfen Sie die Verpackung vor dem ersten Gebrauch auf
Unversehrtheit: verwenden Sie das Produkt nur, wenn die Beutel
und Einzeldosisbehältnisse ungeöffnet sind.

Um eine Verunreinigung zu vermeiden, darf die
Einzeldosisbehältnis-Spitze nicht berührt werden.

Verwenden Sie das Einzeldosisbehältnis nicht wieder, da
der Inhalt nach dem Öffnen nicht mehr vor mikrobieller
Verunreinigung geschützt ist.

Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nicht verbessern,
wenden Sie sich an medizinisches Fachpersonal.

WARNHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht injizieren oder einnehmen.

Fahren Sie nach der Anwendung keine Kraftfahrzeuge und
bedienen Sie keine Maschinen, wenn Ihre Sicht verschwommen
ist. Warten Sie einige Minuten, bis Ihre Sicht wieder klar ist.

Warten Sie mindestens 15 Minuten zwischen der Anwendung
zweier verschiedener Augenprodukte. THEALOZ DUO GEL sollte
zuletzt verwendet werden.

Verdünnen Sie THEALOZ DUO GEL niemals und mischen Sie es
nicht mit anderen Lösungen.

NEBENWIRKUNGEN

Die folgenden Nebenwirkungen wurden berichtet: verklebte
Augen, verschwommenes Sehen, allergische Reaktionen (wie
Überempfindlichkeit, Schwellung des Augenlids, Ausschlag),
Augenausfluss, in seltenen Fällen Augenreizung, Augenschmerzen
und Rötung der Augen.



Bei der Anwendung eines Augengels können kurzzeitig störende Symptome wie Brennen, Stechen und Fremdkörpergefühl im Auge auftreten.

Wenn Sie nach der Anwendung dieses Produkts Nebenwirkungen oder ungewöhnliche Empfindungen feststellen, wenden Sie sich bitte an medizinisches Fachpersonal und teilen Sie die Informationen dem lokalen Vertrieb, dem Hersteller oder der zuständigen Gesundheitsbehörde mit (siehe Kontaktdaten am Ende der Gebrauchsanweisung).

AUFBEWAHRUNG UND ENTSORGUNG

Zwischen 8 °C und 30 °C lagern.
Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.


Verwerfen Sie das Einzeldosisbehältnis unmittelbar nach der Anwendung, auch wenn noch etwas Gel vorhanden ist. Bewahren Sie die ungeöffneten Einzeldosisbehältnisse im Beutel auf, um sie vor Licht zu schützen.

Ungeöffnete Einzeldosisbehältnisse können bis zu einem Monat nach dem ersten Öffnen des Beutels verwendet werden. Nach Ablauf des Verfallsdatums auf dem Einzeldosisbehältnis und der äußeren Verpackung das Produkt nicht mehr anwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag eines Monats, sofern die Verpackung unbeschädigt ist und das Produkt korrekt gelagert wurde.

Entsorgen Sie das Produkt verantwortungsbewusst und gemäß der lokalen Leitlinien (die Einzeldosisbehältnisse und der Beutel sollten im Hausmüll entsorgt werden, der Umkarton und die Packungsbeilage sind recycelbar).

**Erstellungsdatum und Version der Gebrauchsanweisung:
Ver. 10 04/2024**

Hersteller:

 Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Frankreich
www.laboratoires-thea.com
Abschnitt « Contact us »

Vertrieb:













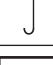
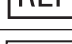

Théa Pharma GmbH
Schillerstraße 3
10625 Berlin
Deutschland
www.theapharma.de
Tel.: 030 / 315 18 98-0

Gesundheitsbehörde:

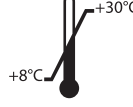Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
53175 Bonn
Deutschland
www.bfarm.de

 0459

BEDEUTUNG DER SYMBOLE AUF DER VERPACKUNG

	Hersteller
	Chargenbezeichnung
	Herstellungsdatum
	Verwendbar bis
	Temperaturgrenzwerte
	Sterilisiert mit aseptischen Verfahren
	Medizinprodukt
	Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht wiederverwenden
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten
	Achtung
	Vor Sonnenlicht schützen
	Trocken aufbewahren
	Katalognummer
	Eindeutige Produktidentifizierung



N2258U30LTA/0724
65NOT6502/E



* 6 5 N O T 6 5 0 2 / E *